

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария

классов Б, В, Г МК-01 «МедКом»

ТУ 9398-004-63102960-2012

РУ № ФСР 2012/14154 от 14 декабря 2012 г.

Контейнер предназначен для использования отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур. Используется для бесконтактного снятия иглы со шприца во избежание получения медработником производственной травмы. Контейнер имеет специальные отверстия для съема металлических острых частей с одноразового медицинского инструментария. Удобен для операционных, процедурных, лечебных учреждений всех профилей.

Применяется в процедурных, операционных, лабораториях, на скорой помощи и др.

Выпускается емкостью: 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,1; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 6,0; 7,5; 10,0; 10,5; 12,0 л.

Контейнеры соответствуют требованиям: ТУ 9398-004-63102960-2012, ГОСТ Р 51760, СанПиН 2.1.7.2790-10.

Комплект поставки:

1. Контейнер;
2. Крышка с встроенной вставкой для безопасного снятия игл со шприца;
3. Маркировочная наклейка.

Алгоритм сбора отходов в одноразовые контейнеры:

1. Возьмите маркировочную наклейку;
2. Заполните предложенную форму, в целях соблюдения СанПин 2.1.7.2790-10;
3. Наклейте заполненную маркировочную наклейку на контейнер;
4. Контейнер на две трети заполните дезинфицирующим средством;
5. Крышку зафиксируйте на контейнере, закрыв ее плотно до щелчка, отверстие для снятия игл при этом должно быть открытым. Крышка оснащена замком, обеспечивающим герметичность; Контейнер готов к использованию!
6. В процессе сбора игл крышка должна находиться в верхнем положении;
7. Выполните инъекцию, поднесите шприц с иглой к контейнеру.
8. Опустите кончик иглы в дезинфицирующий раствор, находящийся внутри контейнера;
9. Потяните поршень шприца на себя;
10. Затем подденьте канюлю иглы за подходящее отверстие на крышке. Игла попадет в дезинфицирующий раствор.
11. Выпустите дезинфицирующий раствор, набранный ранее в шприц через иглу, обратно в контейнер;
12. Заполните контейнер иглами на $\frac{3}{4}$;
13. Прикройте отверстие для игл;
14. Выдержите время экспозиции дезинфицирующего средства, после чего жидкость слейте через отверстие для снятия игл;
15. Отверстие для снятия игл закрыть заглушкой. Проследите за тем, чтобы при закрытии крышки произошел глухой щелчок;
16. Контейнер готов к транспортировке с места образования отходов на место временного хранения на территории ЛПУ.

При сборе медицинских отходов запрещается:

1. Снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции;
2. Пересыпать (перегружать) неупакованные отходы из одной емкости в другую;
3. Утрамбовывать отходы;
4. Осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
5. Устанавливать одноразовые контейнеры для сбора отходов на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.

Условия транспортирования и хранения:

Контейнеры транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Контейнеры транспортируют железнодорожным, автомобильным и речным транспортом в контейнерах по ГОСТ 20435, ГОСТ 22225.

Контейнеры хранят в крытых сухих складских помещениях по условию хранения 2 по ГОСТ 15150 на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Утилизация: Контейнеры с истекшим сроком хранения утилизировать как твердые бытовые отходы. Использованные контейнеры подвергают обеззараживанию и утилизации на специальных полигонах в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует соответствие емкостей требованиям ТУ 9398-004-63102960-2012 при соблюдении условий упаковки, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня реализации через торговую сеть, но не более 15 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью ООО «НПФ «МедКом»

Адрес: 422701, Республика Татарстан, Высокогорский район, село Высокая Гора, ул. Полковая, д.4

Телефоны: +7(843) 537-10-46, 537-10-56, 537-11-66

e-mail: