



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**Спринцовка полиэтиленовая**  
**поливинилхлоридная СПП-«Альфа»**  
**для медицинских процедур тип Б № 15**  
ТУ 9398-033-00149535-2006  
РУ № ФСР 2011/12235 от 09.02.2016г.



**1. Назначение**

Спринцовка предназначена для медицинских целей, в том числе для ирригации (орошения) и отсоса жидкости из послеоперационной полости, в лечебных учреждениях для индивидуального пользования.

**2. Эксплуатация**

Перед применением спринцовку дезинфицируют кипячением в воде (30+5) минут. Наконечник стерилизуют при полном погружении в 3% (по массе) раствор перекиси водорода на 80 минут, затем промывают в чистой проточной воде. Перед применением спринцовки наконечник смазывают нейтральным жиром (вазелином, ланолином). После каждого использования спринцовки наконечник и баллон промывают горячей водой с мылом, ополаскивают чистой проточной водой и просушивают. Спринцовка не рекомендуется к применению масл. Спринцовка стойка к действию водно-спиртовых растворов.

**3. Хранение**

Спринцовку следует хранить в помещении при температуре от 0 до плюс 25°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Спринцовка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, растворителей, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих изделие.

**4. Гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие спринцовок требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, эксплуатации. Гарантийный срок годности спринцовок – 2 года со дня изготовления.

**5. Утилизация**

Утилизация спринцовок после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса Б после дезинфекции их по МУ 287-113.

Дата изготовления (месяц, год):

**Производитель:**

ООО «Объединение Альфапластик»,

Россия, 107150, г. Москва, 4-й проезд Подбельского, д. 3 Тел.: (495) 603-28-29

302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д.14 Тел.: (4862) 59-84-10



**ҚўЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА**  
**СПП-«Альфа» тиббий муолажалари**  
**учун поливинилхлоридли**  
**пластикол спринцовкаси Б тури № 15**  
ТУ 9398-033-00149535-2006  
РУ № 00153/04/15 18.05.2020

**1. Мақсади**

Спринцовка тиббий мақсадлар учун, шу жумладан жаррохликдан кейин бўшлиқлардан суюқликни сўриб олиш ва чайиш учун, даволаш муассасаларида индивидуал фойдаланиш учун мўлжалланган.

**2. Фойдаланиш**

Қўллашдан аввал спринцовкани сувда (30+5 минут) қайнатиб, дезинфекция қилинади. Учи 3% (массасига кўра) водород пероксид эригмасыга 80 минутга тўлиқ ботириб стерилизация қилинади, кейин тоза оқар сувда ювилади. Спринцовкани қўллашдан аввал учи нейтрал мой (вазелин, ланолин) билан мойланади. Спринцовкани ҳар бир ишлатишдан кейин учи ва баллон иссиқ сувда совун билан ювилади, тоза оқар сув билан чайилади ва қуритилади. Спринцовка мойларни қўллашга тавсия этилмайди. Спринцовка сув-спирт эригмаларнинг таъсирига чидамли.

**3. Сақлаш**

Спринцовка 0 дан плюс 25°C ҳароратгача ва ҳавонинг нисбий намлиги 80% дан ошмаганда хонада иситиш асбобларидан камидан 1 м масофада сақланиши керак. Спринцовка тўғридан-тўғри қуёш нурлари, мойлар, эритувчилар, кислоталар, ишкорлар ва буюмни шикастлайдиган бошқа моддалар таъсирида қолиши мумкин эмас.

**4. Ишлаб чиқарувчининг кафолатлари**

Ишлаб чиқарувчи спринцовкаларнинг мақсуд техникавий шартлар талабларига мувофиқлигини, истеъмолчи томонидан ташқиш, сақлаш, фойдаланиш шартларига риоя қилинганда кафолатлайди. Спринцовкаларнинг кафолатли яроқлилик муддати – ишлаб чиқарилган кундан бошлаб 2 йил.

**5. Утилизация қилиш**

Спринцовкаларни фойдаланиш якунлангандан кейин утилизация қилиш даволаш муассасасида амалдаги ва МУ 287-113 бўйича дезинфекциялангандан кейин Б синф чиқиндилари учун СанПиН 2.1.7.2790-10 «Тиббий чиқиндилар билан муомалага қўйиладиган санитар-эпидемиологик талаблар» га мувофиқ ишлаб чиқилган йўриқномага мувофиқ амалга оширилиши керак.

**Ишлаб чиқарувчи:**

«Объединение Альфапластик», МЧЖ,

Россия, 107150, Москва ш., Подбельский 4-чи проезд, 3 уй. Тел.: (495)603-28-27

302011. Орел ш.. Новосильское шоссе, 14 уй. Тел.: (4862) 59-84-10

Штрих-код

460 1835 000 195