



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Спринцовка пластизолевая
поливинилхлоридная СПП- «Альфа»
для медицинских процедур тип А № 1
ТУ 9398-033-00149535-2006
РУ № ФСР 2011/12235 от 09.02.2016г.



1. Назначение

Спринцовка предназначена для медицинских целей, в том числе для ирригации (орошения) и отсоса жидкости из послеоперационной полости, в лечебных учреждениях для индивидуального пользования.

2. Эксплуатация

Перед применением спринцовку дезинфицируют кипячением в воде (30+5) минут. После применения спринцовку промывают горячей водой с мылом, ополаскивают чистой проточной водой и просушивают. Спринцовка не рекомендована к применению масел. Спринцовка стойкая к действию водно-спиртовых растворов.

3. Хранение

Спринцовку следует хранить в помещении при температуре от 0 до плюс 25°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Спринцовка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, растворителей, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих изделие.

4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие спринцовок требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, эксплуатации. Гарантийный срок годности спринцовок – 2 года со дня изготовления.

5. Утилизация

Утилизация спринцовок после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса Б после дезинфекции их по МУ 287-113.

Дата изготовления (месяц, год):

Производитель:

ООО «Объединение Альфапластик»,

Россия, 107150, г. Москва, 4-й проезд Подбельского, д. 3 Тел. (495) 603-28-29

302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д.14 Тел. (4862) 59-84-10



ҚўЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА
СПП-«Альфа» тиббиёт муолажалари
учун поливинилхлоридли
пластизол спринцовкаси А тури № 1
ТУ 9398-033-00149535-2006
РУ № 00153/04/15 18.05.2020

1. Мақсади

Спринцовка тиббиёт мақсадлар учун, шу жумладан жаррохликдан кейин бўшлиқлардан суюқликни сўриб олиш ва чайиш учун, даволаш муассасаларидан индивидуал фойдаланиш учун мўлжалланган.

2. Фойдаланиш

Қўллашдан аввал спринцовкани сувда (30+5 минут) қайнатиб, дезинфекция қилинади. Қўлланилганидан кейин спринцовка иссиқ сувда совун билан ювилади, тоза оқар сувда чайилади ва қуритилади. Спринцовка мойларни қўллашга тавсия этилмайди. Спринцовка сув-спирт эришмаларининг таъсирига чидамли.

3. Сақлаш

Спринцовка 0 дан плюс 25°C ҳароратгача ва ҳавонинг нисбий намлиги 80% дан ошмаганда хонада иситиш асбобларидан камидан 1 м масофада сақланиши керак. Спринцовка тўғридан-тўғри қуёш нурлари, мойлар, эритувчилар, кислоталар, ишқорлар ва бузғунли шикастлайдиган бошқа моддалар таъсирида қолиши мумкин эмас.

4. Ишлаб чиқарувчининг қяфолатлари

Ишлаб чиқарувчи спринцовкаларнинг мазкур техникавий шартлар талабларига мувофиқлигини, истеъмолчи томонидан ташиш, сақлаш, фойдаланиш шартларига риоя қилинганида қяфолатлайди. Спринцовкаларнинг қяфолатли яроқлилиги муддати – ишлаб чиқарилган кундан бошлаб 2 йил.

5. Утилизация қилиш

Спринцовкаларни фойдаланиш якунланганидан кейин утилизация қилиш даволаш муассасасида амалдаги ва МУ 287-113 бўйича дезинфекцияланганидан кейин Б синф чиқиндилари учун СанПин 2.1.7.2790-10 «Тиббий чиқиндилар билан муомалага қўйиладиган санитар-эпидемиологик талаблар» га мувофиқ ишлаб чиқилган Йўриқномага мувофиқ амалга оширилиши керак.

Ишлаб чиқарувчи:

«Объединение Альфапластик», МЧЖ,

Россия, 107150, Москва ш., Подбельский 4-чи проезд, 3 уй. Тел.: (495)603-28-27

302011, Орел ш., Новосильское шоссе, 14 уй. Тел.: (4862) 59-84-10

Штрих-код

460 1835 000 546

Размер 100x150 мм, инструкции односторонние