



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**Спринцовка полиэтиленовая**  
**поливинилхлоридная СПП-«Альфа»**  
**для медицинских процедур тип А № 3**  
ТУ 9398-033-00149535-2006  
РУ № ФСР 2011/12235 от 09.02.2016г.



**1. Назначение**

Спринцовка предназначена для медицинских целей, в том числе для ирригации (орошения) и отсоса жидкости из послеоперационной полости, в лечебных учреждениях для индивидуального пользования.

**2. Эксплуатация**

Перед применением спринцовку дезинфицируют кипячением в воде (30+5) минут. После применения спринцовку промывают горячей водой с мылом, ополаскивают чистой проточной водой и просушивают. Спринцовка не рекомендована к применению масел. Спринцовка стойкая к действию водно-спиртовых растворов.

**3. Хранение**

Спринцовку следует хранить в помещении при температуре от 0 до плюс 25°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Спринцовка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, растворителей, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих изделие.

**4. Гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие спринцовок требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, эксплуатации. Гарантийный срок годности спринцовок – 2 года со дня изготовления.

**5. Утилизация**

Утилизация спринцовок после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса Б после дезинфекции их по МУ 287-113.

Дата изготовления (месяц, год):

**Производитель:**

ООО «Объединение Альфапластик».

Россия, 107150, г. Москва, 4-й проезд Подбельского, д. 3 Тел. (495) 603-28-29

302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д.14 Тел.(4862) 59-84-10



**ҚўЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА**  
**СПП-«Альфа» тиббиёт муолажалари**  
**учун поливинилхлоридли**  
**пластик спринцовкаси А тури № 3**  
ТУ 9398-033-00149535-2006  
РУ № 00153/04/15 18.05.2020

**1. Мақсади**

Спринцовка тиббиёт мақсадлар учун, шу жумладан жаррохликдан кейин бўшлиқлардан суюқликни сўриб олиш ва чайиш учун, даволаш муассасаларида индивидуал фойдаланиш учун мўлжалланган.

**2. Фойдаланиш**

Қўллашдан аввал спринцовкани сувада (30+5 минут) кайнатиб, дезинфекция қилинади. Қўлланилганидан кейин спринцовка иссиқ сувада совути билан ювилади, тоза оқар сувада чайилади ва қуритилади. Спринцовка мойларни қўллашга тавсия этилмайди. Спринцовка сув-спирт эригмаларининг таъсирига чидамли.

**3. Сақлаш**

Спринцовка 0 дан плюс 25°C ҳароратгача ва ҳавонинг нисбий намлиги 80% дан ошмаганда хонада иситиш асбобларидан каминда 1 м масофада сақланиши керак. Спринцовка тўғридан-тўғри қуёш нурлари, мойлар, эритувчилар, кислоталар, ишкорлар ва буюмни шиш астлайдиган бошқа моддалар таъсирида қолиши мумкин эмас.

**4. Ишлаб чиқарувчининг кафолатлари**

Ишлаб чиқарувчи спринцовкаларнинг мазкур техникавий шартлар талабларига мувофиқлигини, истеъмолчи томонидан ташиш, сақлаш, фойдаланиш шартларига риоя қилинганда кафолатлайди. Спринцовкаларнинг кафолатли яроқлилик муддати – ишлаб чиқарилган кундан бошлаб 2 йил.

**5. Утилизация қилиш**

Спринцовкаларни фойдаланиш якунланганидан кейин утилизация қилиш даволаш муассасасида амалдаги ва МУ 287-113 бўйича дезинфекцияланганидан кейин Б синф чиқиндилари учун СанПин 2.1.7.2790-10 «Тиббий чиқиндилар билан муомалага қўйиладиган санитар-эпидемиологик талаблар» га мувофиқ ишлаб чиқилган йўриқномага мувофиқ амалга оширилиши керак.

**Ишлаб чиқарувчи:**

«Объединение Альфапластик», МЧЖ,

Россия, 107150, Москва ш., Подбельский 4-чи проезд, 3 уй. Тел.: (495)603-28-27

302011, Орел ш., Новосильское шоссе, 14 уй. Тел.: (4862) 59-84-10

**Штрих-код**

**460 1835 002 359**