

Технический паспорт

Контейнер для отбора, транспортировки и хранения биологических материалов (для гистологии), с защелкивающейся крышкой и этикеткой с логотипом «Biohazard»

Описание

Контейнеры с широкой горловиной для хранения и транспортирования гистологического, хирургического материала и биологических образцов. Изготовлен из прозрачного нетоксичного полипропилена. Снабжен плотной защелкивающейся крышкой из полипропилена. На контейнере наклеена самоклеящаяся этикетка, предусматривающая символ биологической опасности (логотип «Biohazard») и информационное поле для записи данных об образце. Контейнера, вместимость 2 л и более, снабжены ручкой. Автоклавируется при +121°C в течении 20 минут. Не содержит латекса.

CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

Микробиологический статус	нестерильно
Материал контейнера	полипропилен
Материал крышки	полипропилен
Температурный диапазон для контейнера	От -10°C до +121°C
Температурный диапазон для крышки	От -10°C до +121°C
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»
ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Артикул поставщика	Код	Вместимость	Габаритные размеры (без крышки)			Упаковка
			Верхний Ø	Ø основания	Высота	
12002885	14150/B	150 мл	69 мм	54 мм	67 мм	800 шт.
12002886	14155/B	250 мл	95 мм	77 мм	62 мм	450 шт.
12002887	14142/B	500 мл	120 мм	112 мм	80 мм	100 шт.
12002888	14143/B	1000 мл	120 мм	110 мм	115 мм	100 шт.
12002889	14144/B	1500 мл	120 мм	110 мм	150 мм	50 шт.
12002890	14175/B	2000 мл	170 мм	135 мм	154 мм	125 шт.
12002891	14180/B	3000 мл	199 мм	176 мм	133 мм	100 шт.
12002892	14185/B	5000 мл	227 мм	197 мм	181 мм	50 шт.

Назначение

Контейнеры, как «Медицинское изделие для IN VITRO диагностики», предназначены для сбора биологических жидкостей и проб, и должны использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов.

Национальная классификация медицинских изделий (CND) – W050301029099 (Пластиковые контейнеры для анализов- разные).

Меры предосторожности при использовании

Данный вид контейнеров, так, как и все контейнеры подобного типа с защелкивающейся крышкой, считаются герметичными, но фактически таковыми не является. Рекомендуется при эксплуатации держать контейнеры в вертикальном положении, избегать встряски, резких и/или слишком энергичных движений.

Контейнеры, изготовленные из полипропилена – материала, подходящего для использования совместно с формалином (формальдегид в водном растворе) или с подобными растворами для консервации образцов. Формальдегид, кроме того, считается как токсичное и/или агрессивное вещество, в связи с чем необходимо соблюдать все меры предосторожности для предотвращения утечки и всегда использовать средства индивидуальной защиты в соответствии с действующими правилами.

Всегда проверяйте устойчивость материала контейнера к возможным используемым химическим растворам или веществам, применяемых для хранения/консервации образцов.

Стерилизация

Перед началом процесса стерилизации любых изделий, необходимо проверить наличие следов загрязняющих веществ.

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечению срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.

- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Символы на упаковке


ООО «МИНИМЕД»



Дата производства



Дата истечения срока годности

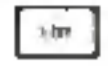

Номер серии



Одноразовое изделие



ПЕРЕВОД ВЕРЕН
Пожалуйста, обратитесь к
сопроводительным документам