

Технический паспорт Петли бактериологические 1 мкл с иглой

Описание

Стерильные бактериологические петли. Петли объемом 1 мкл для микробиологической инокуляции (*введение живых микроорганизмов в питательную среду, почву, организм растения или животного*), с иглой. Изготовлены из гибкого мягкого ударопрочного кристаллического полистирола нейтрального цвета. Достаточное поверхностное натяжение для переноса точных объемов жидкости. Гладкая поверхность обеспечивает легкую перевивку, предотвращая агар от повреждений. Простая и эргономичная ручка. Тонкая игла служит для снятия отдельных колоний с поверхности агара для идентификации бактерий. Эти петли не содержат остатков смазочных веществ, масел или электростатического заряда, поступающих во время производственного процесса. Стерильные, упаковка peel-pack. Не содержат латекса и пирогенов.

СЕ маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/СЕ и D.lgs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

Микробиологический статус	Стерильно (β-излучение)
Материал	Полистирол
Температурный диапазон	От -10°C до +70°C
Цвет	Нейтральный
Объем петли	1 мкл
Общая длина	197 мм
Длина иглы	30,25 мм
Длина ручки	135,5 мм
Внешний диаметр петли	2,5 мм
Внутренний диаметр петли	0,95 ± 0,05 мм
Вес	1,0 гр.
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»
ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Все размеры имеют погрешность в пределах ± 0,5 мм.

Артикул	Код производителя	Упаковка	Кол-во в коробке	Размер коробки	Вес
12007320	6001/SG	Типа Peel-pack, 20 шт	2000 шт.	17×30×17,5 см – 0,009 м ³	2,4 кг
12007353	6002/SG	Типа Peel-pack, 5 шт	1000 шт.	17×30×17,5 см – 0,009 м ³	3,1 кг

Назначение

Петли, как «Медицинское изделие для IN VITRO диагностики», предназначены для инокуляции на транспортные среды и должны использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов.

Национальная классификация медицинских изделий (CND) – W05030302 (Микробиологическая культура, Петли).

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечению срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде, чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Символы на упаковке




Дата производства



Дата истечения срока годности



Пожалуйста, обратитесь к
сопроводительным документам

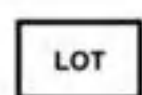

Номер серии



Одноразовое изделие



Стерилизация ионизирующим излучением