



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Спринцовка пластизольная
поливинилхлоридная СПП- «Альфа»
для медицинских процедур тип Б № 9
ТУ 9398-033-00149535-2006
РУ № ФСР 2011/12235 от 09.02.2016г.



1. Назначение

Спринцовка предназначена для медицинских целей, в том числе для ирригации (орошения) и отсоса жидкости из послеоперационной полости, в лечебных учреждениях для индивидуального пользования.

2. Эксплуатация

Перед применением спринцовку дезинфицируют кипячением в воде (30+5) минут. Наконечник стерилизуют при полном погружении в 3% (по массе) раствор перекиси водорода на 80 минут, затем промывают в чистой проточной воде. Перед применением спринцовки наконечник смазывают нейтральным жиром (вазелином, ланолином). После каждого использования спринцовки наконечник и баллон промывают горячей водой с мылом, ополаскивают чистой проточной водой и просушивают. Спринцовка не рекомендуется к применению масел. Спринцовка стойка к действию водно-спиртовых растворов.

3. Хранение

Спринцовку следует хранить в помещении при температуре от 0 до плюс 25°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Спринцовка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, растворителей, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих изделие.

4. Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие спринцовок требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, эксплуатации. Гарантийный срок годности спринцовок – 2 года со дня изготовления.

5. Утилизация

Утилизация спринцовок после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса Б после дезинфекции их по МУ 287-113.


Дата изготовления (месяц, год):

Производитель:

ООО «Объединение Альфапластик»,

Россия, 107150, г. Москва, 4-й проезд Подбельского, д. 3 Тел.: (495) 603-28-29

302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д.14 Тел.: (4862) 59-84-10

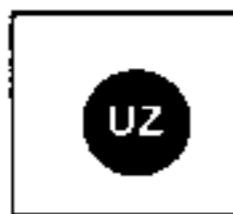

ҚўЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА
СПП-«Альфа» тиббиёт муолажалари
учун поливинилхлоридли
пластизол спринцовкаси Б тури № 9
ТУ 9398-033-00149535-2006
РУ № 00153/04/15 18.05.2020

1. Мақсад

Спринцовка тиббиёт мақсадлар учун, шу жумладан жаррохликдан кейин бўшлиқлардан суюқликни сўриб олиш ва чайиш учун, даволаш муассасаларида индивидуал фойдаланиш учун мўлжалланган.

2. Фойдаланиш

Қўллашдан аввал спринцовкани сувада (30+5 минут) қайнатиб, дезинфекция қилинади. Учи 3% (массасига кўра) водород пероксид эригмасыга 80 минутга тўлиқ ботириб стерилизация қилинади, кейин тоза оқар сувада ювилади. Спринцовкани қўллашдан аввал учи нейтрал мой (вазелин, ланолин) билан мойланади. Спринцовкани ҳар бир ишлатишдан кейин учи ва баллон иссиқ сувада совун билан ювилади, тоза оқар сув билан чайилади ва қуритилади. Спринцовка мойларни қўллашга тавсия этилмайди. Спринцовка сув-спирт эригмаларининг таъсирига чидамли.

3. Сақлаш

Спринцовка 0 дан плюс 25°C ҳароратгача ва ҳавонинг нисбий намлиги 80% дан ошмаганда хонада иситиш асбобларидан камида 1 м масофада сақланиши керак. Спринцовка тўғридан-тўғри кўёш нурлари, мойлар, эритувчилар, кислоталар, ишқорлар ва буюмни шикастлайдиган бошқа моддалар таъсирида қолиши мумкин эмас.

4. Ишлаб чиқарувчининг кафолатлари

Ишлаб чиқарувчи спринцовкаларнинг мазкур техникавий шартлар талабларига мувофиқлигини, истеъмолчи томонидан ташиш, сақлаш, фойдаланиш шартларига риоя қилинганда кафолатлайди. Спринцовкаларнинг кафолатли яроқлилиқ муддати – ишлаб чиқарилган кундан бошлаб 2 йил.

5. Утилизация қилиш

Спринцовкаларни фойдаланиш якунланганидан кейин утилизация қилиш даволаш муассасасида амалдаги ва МУ 287-113 бўйича дезинфекцияланганидан кейин Б синф чиқиндилари учун СанПин 2.1.7.2790-10 «Тиббий чиқиндилар билан муомалага қўйиладиган санитар-эпидемиологик талаблар» га мувофиқ ишлаб чиқилган йўриқномага мувофиқ амалга оширилиши керак.

Ишлаб чиқарувчи:

«Объединение Альфапластик», МЧЖ,

Россия, 107150, Москва ш., Подбельский 4-чи проезд, 3 уй. Тел.: (495)603-28-27

302011, Орел ш., Новосильское шоссе, 14 уй. Тел.: (4862) 59-84-10

Штрих-код

460 1835 000 171