


Технология использования картонного контейнера


Сборка контейнера согласно пошаговой инструкции, расположенной на внешней стороне контейнера

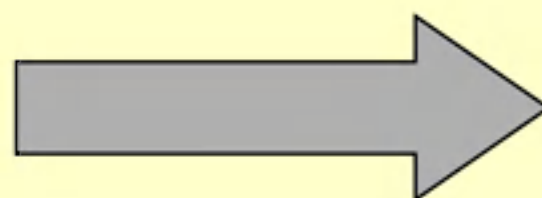

Сбор мед. отходов с использованием средств индивидуальной защиты



Загрузка контейнера в стерилизатор (автоклав).
Режим обеззараживания: $132 \pm 2^\circ\text{C}$, давление 0,2 МПа 60 минут

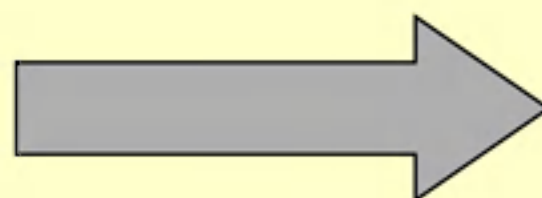

После процедуры автоклавирования необходимо наклеить этикетку «ОБЕЗЗАРАЖЕНО». Перевод в «НЕОПАСНЫЕ» отходы, кл. А



Вторичное использование (РЕЦИКЛИНГ) или захоронение

Специалистами ООО «ПКФ «Медфарм» при научном взаимодействии с ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии» во главе с директором, д.м.н., профессором Т.Ф. Степановой, а также с «Центром медицинской профилактики» Управления здравоохранения администрации г. Екатеринбурга, при активном участии главного врача, к.м.н. А. А. Харитонов, был разработан новый вид одноразовых контейнеров для сбора, временного хранения и удаления эпидемиологически опасных и чрезвычайно опасных медицинских отходов — Контейнеры из многослойного, влагостойкого, прессованного картона «ОМОПАК».

Данные контейнеры предназначены для сбора медицинских отходов классов «Б» и «В», в том числе колющих и режущих, применяются в организациях осуществляющих медицинскую деятельность, в том числе микробиологических, паразитологических, клинико-диагностических лабораториях, различных отделениях стационаров, процедурных, хирургических, прививочных кабинетах, в машинах скорой медицинской помощи, косметологических, парикмахерских салонах и т. п., а также ветеринарных клиниках. Сбор жидких отходов в контейнеры «ОМОПАК» не производится

Согласно п.2.2., части II, СанПиН 2.1.7.2790–10 «...после аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность повторного применения, отходы классов «Б» и «В» могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться совместно с отходами класса «А». Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов «Б» и «В» должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов».

То есть при выполнении всех указанных условий в стенах ЛПУ после процедуры обеззараживания, разрешено смешивать указанные виды отходов, временно хранить и удалять на полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) как отходы эпидемиологически безопасные, по составу приближенные к отходам класса «А».

ОМОПАК®

