

Технический паспорт

Контейнеры, специализированные для утилизации отходов

Описание

Контейнеры для отходов круглой формы. В данную линейку изделий включены одноразовые и проколостойкие контейнеры круглой формы для утилизации острых, режущих и других отходов. Коническая форма и выемки на крышке облегчают сброс и удаление иглы, в том числе «противопотоковые» лепестки в крышке предотвращают проливание отходов. Все модели оснащены крышкой с двумя типами закрытия (временный и окончательный) и оснащены прочной ручкой для переноски. Три наиболее объемные модели снабжены эргономичной ручкой для легкого использования.

Используемые материалы

Экологически чистый пластик (цветной сополимер полипропилена, соответствующий регламенту REACH, и концентрат красителя, не содержащий тяжелых металлов и кадмия). Желтый корпус контейнера и красная крышка позволяют немедленно идентифицировать и предупредить об опасности содержимого.

Сертификация

Сертификация качества NF 302 (за исключением изделия с кодом 7120).

Британский институт стандартов - Соответствует BS 7320

Соответствует ADR.

Автоклавирруется при +134°C в течение 18 минут – Протоколы испытаний по LNE K050326-1

Соответствует требованию Ассоциации французской стандартизации (AFNOR) NF X-30-500 (за исключением изделия с кодом 7120).

FDA (Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США) K071517.

Сертификат UN (ООН)

TUV SUD (ТЮФ ЗЮД, немецкая экспертная организация).

Достоинства

- Снабжены эргономичной ручкой для более объемных моделей;
- «Противопотоковые» лепестки на крышке, предотвращающие отток отходов;
- Механизм для бесконтактного сброса иглы;
- Необратимое окончательное закрытие;
- Индикация максимального уровня заполнения;
- Различные варианты исполнения;
- Отсутствуют выбросы вредных газов при сжигании. После заполнения контейнеры должны быть утилизированы путем сжигания, без выброса токсичных отходов;
- Автоклавируются при +134°C в течение 18 минут.

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Техническая характеристика

Код изделия производителя	7006	7008
Артикул поставщика	12026260	12026261
Назначение	Изделие предназначено для мест с низким уровнем отходов (лотки при обходе, столики на колесиках, домашнего ухода, кабинета врача и т.д.)	Изделие предназначено для мест с низким уровнем отходов (лотки при обходе, столики на колесиках, домашнего ухода, кабинета врача и т.д.)
Габаритные размеры	Ø 100 × Н 145 мм	Ø 100 × Н 184 мм
Толщина	1,9 мм	1,9 мм
Форма	Усеченный конус	Усеченный конус
Вес	81 г	104,20 г
Максимальная нагрузка	0,4 кг	0,460 кг
Номинальная вместимость	0,60 л	0,80 л
Эффективный объем	0,67 л	0,81 л
Полезный объем	0,536 л	0,652 л
Код изделия производителя	7015	7020
Артикул поставщика	12026262	12026268
Назначение	Изделие предназначено для частого использования (больницы, центры здоровья, клиники)	Изделие предназначено для частого использования (больницы, центры здоровья, клиники)

Габаритные размеры	Ø 140 × Н 165 мм	Ø 140 × Н 210 мм
Толщина	1,9 мм	1,9 мм
Форма	Усеченный конус	Усеченный конус
Вес	139 г	175 г
Максимальная нагрузка	0,850 кг	1,2 кг
Номинальная вместимость	1,50 л	2,00 л
Эффективный объем	1,60 л	2,25 л
Полезный объем	1,20 л	1,60 л
Код изделия производителя	7050	7070
Артикул поставщика	-	12006209
Назначение	Изделие предназначено для частого использования (больницы, центры здоровья, клиники)	Изделие предназначено для частого использования (больницы, центры здоровья, клиники)
Габаритные размеры	Ø 213 × Н 195 мм	Ø 248 × Н 195 мм
Толщина	1,9 мм	1,9 мм
Форма	Усеченный конус	Усеченный конус
Вес	376 г	447 г
Максимальная нагрузка	2 кг	2,8 кг
Номинальная вместимость	5,00 л	7,00 л
Эффективный объем	4,70 л	6,20 л
Полезный объем	3,632 л	4,96 л
Код изделия производителя	7120	ООО «МИНИМЕД» ПЕРЕВОД ВЕРЕН
Артикул поставщика	-	
Назначение	Изделие предназначено для частого использования (больницы, центры здоровья, клиники)	
Габаритные размеры	Ø 248 × Н 310 мм	
Толщина	1,7 мм контейнера 1,8 мм крышки	
Форма	Усеченный конус	
Вес	565 г	
Максимальная нагрузка	2,2 кг	
Номинальная вместимость	12,00 л	
Эффективный объем	11,00 л	
Полезный объем	8,8 л	

Инструкция

Сборка. Нажмите твердо ладонями по кругу крышки. «Щелчок» будет свидетельствовать о закрытии крышки.

Важно! Перед использованием отожмите «противопотоковые» лепестки для создания воронкообразного отверстия. Это устройство облегчает внесение отходов и создает барьер, способствующий избеганию утечки.

Временное закрытие: Контейнер может быть временно закрыт с помощью колпачка, с вогнутой частью вверх. На этом этапе контейнер еще может быть открыт.

Окончательное закрытие: Контейнер может быть закрыт окончательно с помощью колпачка, с вогнутой частью вниз, до щелчка.

Использование

Во время использования, откройте и закройте крышку во временном режиме. Закройте заполненный контейнер окончательно и необратимо, позиционируя колпачок на сторону окончательного закрытия.

Снятие игл

Используйте «V»-образный отсек для снятия иглы со шприца.

Отверстие для введения шприц-ручки инсулина: Введите ручку в отверстие типа «ромашка» и потяните ручку снизу-вверх (эффект рычагов), прежде чем начать откручивать.

Отверстие для введения отходов: большое отверстие, позволяющее введение среди прочего пробирок, скальпелей и т.д.

Инструкция по эксплуатации

- Используйте изделие только с крышкой, идущей в комплекте. Не используйте контейнер до установки крышки.
- Не используйте до нажатия «противопотоковых» лепестков на крышке.
- Не пытайтесь открыть контейнер, закрытый окончательно, и использовать его снова.
- Не пытайтесь извлечь объекты, находящиеся внутри контейнера.
- Не превышайте уровень заполнения контейнера, обозначенный надрезом на стороне контейнера (80% реальной емкости).
- Контейнеры испытаны на устойчивость к прокалыванию острыми предметами, обеспечивая безопасность оператора, пока контейнер используется согласно инструкции.
- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечению срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.

- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Код	Количество (шт.)	Габаритные размеры коробки (см)	Объем (м³)
7006	100	82 × 124 × 220	2,237
7008	100	82 × 124 × 220	2,237
7015	100	83 × 121 × 220	2,209
7020	75	83 × 121 × 220	2,209
7050	55	80 × 120 × 220	2,112
7070	40	80 × 120 × 220	2,112
7120	25	80 × 120 × 220	2,112