



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ

с перфорированным поддоном и крышкой
для дезинфекции и стерилизации медицинских изделий,
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий,
«КДС - КРОНТ»



Основные параметры контейнеров и комплектность:

Модель контейнера	Рабочий объем, л	Габаритные размеры, мм	Нагрузка на перфорированный лоток, не более кг	Масса, кг	Температура, выдерживаемая контейнером, °С	Ванна	Перфорированный поддон	Утопитель	Крышка	Паспорт
КДС-0-1	0,1	Ø100xh50	0,15	0,08	+121	1	1	-	1	1
КДС-0-2	0,2	Ø26xh72	0,25	0,11	+121	1	1	-	1	1
КДС-1	1	280x166x105	1,2	0,5	+121	1	1	1	1	1
КДС-3	3	370x185x120	1,8	0,8	+121	1	1	1	1	1
КДС-5	5	400x266x165	8,0	1,2	+121	1	1	1	1	1
КДС-10	10	450x325x205	8,0	2,0	+121	1	1	1	1	1
КДС-11	11	770x280x170	8,0	2,6	+121	1	1	-	1	1
КДС-20	20	760x480x190	15,0	4,7	+65	1	1	-	1	1
КДС-30	30	840x470x225	15,0	6,5	+65	1	1	-	1	1
КДС-35	35	840x470x240	15,0	8,4	+65	1	1	-	1	1
КДС-5	15	450x460x180	12,0	1,8	+65	1	-	1	1	1
КДС-6П-1*	6	415x365x80	5,0	0,05	+65	1	-	-	-	1
КДС-6П-1К	6	420x360x70	5,0	1,1	+85	1	-	-	1	1
КДС-6П-2*	5,5	415x355x80	5,0	0,05	+65	1	-	-	-	1
КДС-6П-2К	5,5	420x360x70	5,0	1,1	+65	1	-	-	1	1

Подготовка и порядок работы

1. Провести экспозицию собранных частей контейнера, протереть детали контейнера моющим раствором, ополоснуть водой, высушить и провести обработку в соответствии с МУ №257-113.
2. Обработка инструментов и изделий медицинское назначение осуществляется в соответствии с МУ №257-113 дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ. Для проведения обработки изделий следует:
 - поместить обрабатываемые изделия в перфорированный поддон и опустить в ванну;
 - закрыть ванну раствором до полного погружения обрабатываемых изделий, добиться полного заполнения поддона раствором (для обработки поддон погружения лотков предметов использовать утопитель);
 - закрыть ванну с поддоном крышкой и выдержать экспозицию согласно схеме обработки;
 - вынуть поддон из ванны, установить его для стечения раствора согласно конструктивной вместимости изделия
3. По окончании работы проводить обработку составных частей контейнера в соответствии с дезинфицирующими и стерилизующими средствами, разрешенными в РФ.
4. Контейнер КДС-30, КДС-35, оснащается синим индикатором по заказу производителя. Контейнеры КДС-30 и КДС-35 рекомендуются устанавливать на специально выделенную КЕ-01-КРОНТ-1х (по заказу).

Техника безопасности

К работе по дезинфекции и стерилизации допускается лица, ознакомленные с дезинфицирующими свойствами техники безопасности при работе с конкретными дезинфицирующими средствами.

Свидетельство о приемке:

Контейнер КДС «КРОНТ» модель _____ соответствует Техническому условию ТУ 94 01-009-117694-96-2001 и пригоден для эксплуатации
Дата изготовления _____ Годовая _____

Шагги предприятия

Гарантийное обслуживание:

- Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня изготовления (гарантийный срок применения 6 месяцев при соблюдении правил транспортирования хранения и эксплуатации).
- При обнаружении дефекта в гарантийный период дефектное изделие или его составная часть заменяется. Дефектное изделие, акт о наличии дефекта и записанный гарантийный талон направляются на предприятие-изготовитель.

Гарантийный талон

ЗАО «КРОНТ-М» _____ Контейнер _____
 68 Пролетарская ул., д. 10/11, г. Владивосток, Приморский край, Россия
 Тел: (423) 350-64-84 факс: (423) 350-64-84
 E-mail: kront@kront.ru
 www.kront.ru
 Дата изготовления _____ Дата окончания гарантии _____
 Место изготовления _____ Место эксплуатации _____
 Владелец и адрес владельца _____ Адрес обслуживания _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

ЗАО «КРОНТ-М»

Выполнение работ в соответствии с условиями договора № _____

Дата: _____

Шагги