

Паспорт

Крафт-пакеты бумажные

для паровой и воздушной стерилизации однократного применения

1. Назначение

Предназначены для упаковывания изделий, подлежащих стерилизации, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации и хранения до использования по назначению.

2. Основные технические характеристики

- Крафт-пакеты изготовлены из мешочной бумаги марок М-78А, М-78Б по ГОСТ 2228-81.
- Размеры крафт-пакетов, см: 7×10, 7×20, 8×12, 9×30, 10×15, 10×25, 11×14, 11×20, 11×25, 15×25, 17×30, 20×25, 23×28, 23×40, 25×36, 28×40, 32×42, 40×40. Размер пакетов выбирают с учетом габаритов и особенностей медицинских изделий, подлежащих стерилизации.
- Пакеты представляют собой прямоугольный конверт, склеенный по центральному шву и нижней его части.
- Срок хранения медицинских изделий после стерилизации в пакетах составляет 3 дня при скреплении их скрепкой. При открытом крафт-пакете стерилизованные материалы и изделия должны быть использованы сразу.
- Основные показатели мешочной бумаги:

| № | Показатель | Значение |
|---|--|-----------|
| 1 | Масса бумаги площадью 1 м ² , г | 78 ± 2 |
| 2 | Разрушающее усилие, Н, не менее (МН / ПН) | 60 / 40 |
| 3 | Относительное удлинение при растяжении, %, не менее (МН / ПН) | 1,4 / 1,9 |
| 4 | Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб ₆₀), г, не более | 30 |
| 5 | Влажность, % | 7,0-10,0 |

* МН – машинное направление, ПН – поперечное направление.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировке. Упаковка, условия транспортирования и хранения крафт-пакетов должны соответствовать ГОСТ 1641-75. Хранить пакеты следует в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемом помещении при температуре от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%, в защищенном от солнечного света месте.

4. Требования безопасности

Перед применением пакеты осматривают, проверяя их целостность и срок годности по маркировке тары. Не допускается использовать поврежденные пакеты и пакеты с истекшим сроком годности. Во избежание разрыва швов пакетов в процессе стерилизации пакеты не следует заполнять более чем на ¾ объема или длины пакета. Пакеты предназначены для однократного применения. Запрещается использовать изделия из пакетов, если истек срок хранения стерилизованных изделий или отсутствует информация о дате стерилизации; нарушена целостность пакета; пакет находится во влажном состоянии.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. После использования пакеты подлежат утилизации как бытовые отходы.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «КРАФТ СПб», Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.6, лит. А, пом. 1-Н.
Поставщик: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.
Срок годности при соблюдении условий хранения составляет – 5 лет с даты изготовления.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.