



МиниМед®
поставщик лабораторий

ДАРТАСА

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Дистрибьютор в РФ и странах СНГ: ООО «МиниМед», Россия

Технический паспорт

Пробирка с антикоагулянтом (цитрат натрия 0,25 мл) 2,25 мл, 13 × 75 мм, с желтой пробкой и этикеткой

Код изделия производителя: **2525**

Артикул поставщика: **11005487**

Описание

Пробирка для взятия крови, цилиндрическая, Ø 13 × 75 мм с 0,25 мл жидкого антикоагулянта цитрата натрия (3,8 %) для 2,25 мл крови. Слаблена этикеткой с отметкой уровня заполнения на 2,5 мл (соотношение антикоагулянта и крови 1:9) и герметичной полиэтиленовой пробкой желтого цвета. Пробирка изготовлена из медицинского полипропилена высокой прозрачности. Не содержит латекса.

CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

Микробиологический статус	Стерильно
Материал пробирки	Полипропилен
Материал пробки	Полиэтилен
Цвет пробки	Желтый
Температурный диапазон	от 0°C до +40°C
Размеры пробирки, мм	Ø 13 × 75
Объем пробирки, мл	5,0
Соотношение антикоагулянта и крови	1:9
Метка уровня заполнения, мл	2,5
Антикоагулянт	Цитрат натрия (3,8% - 0,129 моль/л)
Срок годности	2 года

ООО «МИНИМЕД»
ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Пробирка лабораторная используется, как «Медицинское изделие для INVITRO диагностики», предназначена для содержания крови при проведении лабораторных диагностических анализов, и должна использоваться только при проведении профессиональных лабораторных исследований.

Национальная классификация медицинских изделий – W050101010201 (Забор крови, пробирки с наполнителями или сепараторами).

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Хранить в сухом месте, вдали от источников тепла и не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 1000

Внутренняя упаковка (шт.): 50
шт. в штативе

Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 47 × 37 × 19,5

Вес (кг): 4,5

Объем (м³): 0,034

Символы на упаковке

