



ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ШТАТИВЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ
ПРОБИРОК ШЛП-10 (10-гнездный)
 ТУ 9452-156-05519988-2006
 Регистрационное удостоверение
 на медицинское изделие
 от 22.08.2016 г. № ФСР 2011/11883
 Этикетка 3872.6.156.002 ЭТ

Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛП (в дальнейшем-штатив) предназначен для установки стеклянных пробирок с питательными средами, культурами бактерий и реактивами.

Штатив предназначен для применения в лечебно-профилактических учреждениях.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Штативы соответствуют техническим условиям ТУ 9452-156-05519988-2006 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _____ ОТК К-05-12

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации штативов - 1 год со дня продажи. Гарантийный срок хранения штативов - 3 года со дня изготовления.

Наименование и адрес производителя/организация, принимающая претензии

ООО «Полимерные изделия» Россия, 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Салиха Сайдашева, д. 12
 телефон/факс (843) 293-25-03, 278-23-05,
 телефон 278-22-77

E-mail: info@polimizd.ru www.polimizd.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Комплект поставки штативов:

Наименование	Кол-во, шт
Штатив ШЛП-10: корпус	1
основание	1
стойка	4
Эксплуатационная документация	
Этикетка 3872.6.156.002 ЭТ	1

Детали штатива изготовлены:
 корпус, основание - из полиэтилена низкого давления марки ПЭНТ-12 ТУ 2243-176-00203335,
 стойка - из полиэтилена марки PP1500J ТУ 2211-136-05766081.

Габаритные размеры штатива: 10-гнездного- (130-4)х(68-1,9)х(80-1,9)мм.

Масса одного штатива - не более 0,2 кг.

Средний срок службы штатива - не менее двух лет.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Штативы подвергаются дезинфекции 6% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 или 0,5% раствором перекиси водорода или 3% раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-97 двукратным протиранием салфеткой из бязи или марли с интервалом между протираниями 15 минут при температуре +18°C.

ХРАНЕНИЕ

Штативы в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °С.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Штативы не токсичны.

Утилизация должна проводиться по правилам, установленным СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"