

Технический паспорт

Пробирка лабораторная 10мл, цилиндрическая, с винтовой крышкой и основанием, стерильная

Код изделия производителя: **10150/SG**

Артикул поставщика: **11005644**

Описание

Пробирка 10 мл, на основании. Изготовлена из медицинского полипропилена, с делениями, с винтовой крышкой белого цвета и матовым окном для записи информации. Стерильно, упаковка 100 штук. Не содержит латекс. Относительная центробежная сила, действующая на пробирку, не должна превышать 6000 g в течение 20 минут.

CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Микробиологический статус | Стерильно |
| Материал пробирки | Полипропилен |
| Материал крышки | Полиэтилен |
| Температурный диапазон для пробирки | от -10°C до +121°C |
| Температурный диапазон для крышки | от -50°C до +75°C |
| Шкала градуировки | мин. 1 мл - макс. 10 мл |
| Цена деления, мл | 1,0 |
| Размеры пробирки, мм | Ø 16 × 100 |
| Размеры крышки, мм | Ø 20 × 11 |
| Вес пробирки, гр. | 3,8 |
| Вес крышки, гр. | 0,9 |
| Срок годности | 5 лет |

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Пробирки лабораторные, как «Медицинское изделие для INVITRO диагностики», предназначены для сбора крови и биологических жидкостей, и должны использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов. *Национальная классификация медицинских изделий (CND) - W050301020102 (Анализ образцов, пластиковые пробирки без добавок).*

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 2000

Внутренняя упаковка (шт.): 100

Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 55 × 35,5 × 45,7

Вес (кг): 11,7

Объем (м³): 0,089

Символы на упаковке



Дата производства




Дата истечения срока годности



Одноразовое изделие



Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам

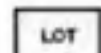

Номер серии

Стерилизация ионизирующим излучением