

Технический паспорт

Пробирка с коагулянтом (активатор свертывания) 5 мл, с красной пробкой и этикеткой

Код изделия производителя: **3558/E**

Артикул поставщика: **11005461**

Описание

Цилиндрическая пробирка Ø 12 × 86 мм, изготовлена из медицинского полиметилметакрилат (ПММА) высокой прозрачности, с активатором свертывания для 5 мл крови. Пробирка имеет круговую градуировку, снабжена этикеткой и пробкой красного цвета, гарантирующую герметичное закрытие. Микрочастицы двуоксида кремния равномерно распределены по внутренним стенкам пробирки, которые активируют свертывание после осторожного встряхивания пробирки сразу после взятия пробы. Максимальная скорость центрифугирования 3500 об/мин. Не содержит латекса.

CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.Igs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

Микробиологический статус	Нестерильно
Материал пробирки	Полиметилметакрилат
Материал пробки	Полиэтилен
Температурный диапазон для пробирки	от -40°C до +85°C
Температурный диапазон для пробки	от -50°C до +75°C
Размеры пробирки, мм	Ø 12 × 86
Номинальный объем, мл	5,0
Срок годности	2 года

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Пробирка лабораторная используется, как «Медицинское изделие для INVITRO диагностики», предназначена для содержания крови при проведении лабораторных диагностических анализов, и должна использоваться только при проведении профессиональных лабораторных исследований.

Национальная классификация медицинских изделий – W 050101010201 (Сбор крови, пробирки с добавками или активатором свертывания).

Классификатор EDMA (Европейская диагностическая ассоциация производителей): 51011001 – Пробирки для серологии (без антикоагулянта).

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Хранить в сухом месте, вдали от источников тепла и не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 1000

Внутренняя упаковка (шт.): 50 шт. в штативе


Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 47 × 23 × 37

Вес (кг): 5,0

Объем (м³): 0,039


Символы на упаковке

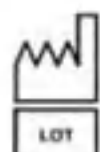

Дата производства



Дата истечения срока годности

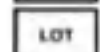

Номер серии



Одноразовое изделие



Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам