

Технический паспорт

Пробирка с коагулянтом (гранулы+активатор свертывания) 5 мл, с пробкой и этикеткой

Код изделия производителя: **4878/E**

Артикул поставщика: **11005460**

Описание

Цилиндрическая пробирка Ø 12 × 86 мм, изготовлена из медицинского полипропилена, прозрачного и инертного. Пробирка содержит барьерные компоненты – гранулы (в полистироле, инертные и закругленные с целью избежать повреждения клеток) для 5,0 мл крови, которые после центрифугирования создают достаточный барьер (не полностью герметичный) между плазмой и сывороткой (относительная центробежная сила, действующая на пробирку, не должна превышать 1500 g в течение 20 минут). Пробирка также содержит инертную добавку, ускоряющую коагуляцию и приводящую к быстрому отделению сгустка. Оборудована герметичной полиэтиленовой пробкой голубого цвета и этикеткой. Максимальная скорость центрифугирования 5000 об/мин. Не содержит латекса.

CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.Igs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

Микробиологический статус	Нестерильно
Материал пробирки	Полипропилен
Материал пробки	Полиэтилен
Температурный диапазон для пробирки	от -10°C до +121°C
Температурный диапазон для пробки	от -50°C до +75°C
Размеры пробирки, мм	Ø 12 × 86
Номинальный объем, мл	5,0
Срок годности	2 года

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Пробирка лабораторная используется, как «Медицинское изделие для INVITRO диагностики», предназначена для содержания крови при проведении лабораторных диагностических анализов, и должна использоваться только при проведении профессиональных лабораторных исследований.

Национальная классификация медицинских изделий – W 050101010201 (Сбор крови, пробирки с добавками или активатором свертывания).

Классификатор EDMA (Европейская диагностическая ассоциация производителей): 51011001 – Пробирки для серологии (без антикоагулянта).

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Хранить в сухом месте, вдали от источников тепла и не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 1000

Внутренняя упаковка (шт.): 50 шт. в штативе


Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 47 × 23 × 37

Вес (кг): 5,0

Объем (м³): 0,039

Символы на упаковке

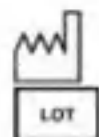

Дата производства



Номер серии



Дата истечения срока годности



Одноразовое изделие



Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам