

**Технический паспорт  
Петли бактериологические 1+10 мкл**

**Описание**

**Петля бактериологическая имеет две петли разного объема.** Петля с объемом 10 мкл на одном конце и 1 мкл на другом. Предназначены для микробиологической инокуляции (*введение живых микроорганизмов в питательную среду, почву, организм растения или животного*). Изготовлены из гибкого мягкого ударопрочного кристаллического полистирола желтого цвета. Достаточное поверхностное натяжение для переноса точных объемов жидкости. Гладкая поверхность обеспечивает легкую перевивку, предотвращая агар от повреждений. Простая и эргономичная ручка. Эти петли не содержат остатков смазочных веществ, масел или электростатического заряда, поступающих во время производственного процесса. Стерильные, упаковка peel-pack. Не содержат латекса и пирогенов.

*СЕ маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/СЕ и D.lgs 332 от 08/09/2000.*

**Технические характеристики**

Микробиологический статус	Стерильно (β-излучение)
Материал	Полистирол
Температурный диапазон	От -10°C до +70°C
Цвет	Желтый
Объем петли	10 мкл + 1 мкл
Общая длина	199 мм
Длина ручки	135 мм
Внешний диаметр петли	2,5 мм / 6,35 мм
Внутренний диаметр петли	0,95 ± 0,1 мм / 3,85 ± 0,1 мм
Вес	1,0 гр.
Срок годности	5 лет

Все размеры имеют погрешность в пределах ± 0,5 мм.

ООО «МИНИМЕД»  
ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Артикул	Код производителя	Упаковка	Кол-во в коробке	Размер коробки	Вес
12007322	6005/SG	Типа Peel-pack, 20 шт	2000 шт.	17×30×17,5 см – 0,009 м <sup>3</sup>	2,4 кг

**Назначение**




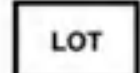


Петли, как «Медицинское изделие для IN VITRO диагностики», предназначены для инокуляции на транспортные среды и должны использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов.

*Национальная классификация медицинских изделий (CND) – W05030302 (Микробиологическая культура, Петли).*

**Инструкция по эксплуатации**

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечению срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде, чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

**Символы на упаковке**

	Дата производства		Дата истечения срока годности		Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам
	Номер серии		Одноразовое изделие		Стерилизация ионизирующим излучением